

Probenversandanleitung zum Nachweis zirkulierender Tumorzellen

An den Arzt / die Ärztin

- 1 Nehmen Sie der/m Patientin/en 2 x 7,0 ml venöses Blut ab. Bitte achten Sie darauf, dass das Blut langsam aufgezogen wird, um Scherkräfte zu minimieren.
- 2 Bitte beschriften Sie die Probenröhrchen und den beiliegenden Anforderungsbogen für zirkulierende Tumorzellen eindeutig mit der Patientennummer und geben sie Datum und Uhrzeit der Blutentnahme an.
- 3 Das Blut durch mehrmaliges, vorsichtiges Schwenken des mit der Stabilisierungslösung gefüllten Röhrchens durchmischen. Röhrchen kalt stellen (4 bis 8 °C), **nicht einfrieren** und den Versand vorbereiten:

Legen Sie die Kühlmittel unten in das Styroporpaket. Geben Sie die Probenröhrchen in den mit Schaumstoff gefüllten Plastikbehälter, indem Sie diese schraubend in den Schaumstoff drehen. Legen Sie die Luftpolster um den Plastikbehälter mit den Probenröhrchen und geben beides in den Innenraum des Paketes. Der Plastikbehälter mit den Probenröhrchen sollte **keinen unmittelbaren Kontakt** mit den Kühlmitteln haben.

- 4 Benachrichtigen Sie uns bitte spätestens **einen Tag vor der Blutentnahme**, damit wir den Paketdienst zur Abholung zu Ihnen bestellen können:

Tel.: 0511 20 30 448 oder 05171 802 31 31.

Auf Anfrage wird Ihnen Versandmaterial zur Gewinnung zirkulierender Tumorzellen aus Vollblut zur Verfügung gestellt. Das Versandmaterial ist kostenlos, wenn uns das Probenmaterial zugeschickt wird; ansonsten wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,- Euro erhoben.

Die Ihnen zugesandten Probenröhrchen und das Kühlsystem dienen ausschließlich zur Gewinnung zirkulierender Tumorzellen aus Vollblut.

Bitte lagern Sie das Kühlmittel bis zum Versand bei -20 °C.

Verwenden Sie zur Blutentnahme ausschließlich die Ihnen zugesandten Probenröhrchen

Wichtig: Zirkulierende Tumorzellen können nur dann erfolgreich nachgewiesen werden, wenn uns das eingesandte Blut **spätestens 24 Stunden** nach der Blutentnahme erreicht.

Am günstigsten sollte die Blutentnahme am Nachmittag erfolgen.

Sie haben Fragen?
Sie benötigen Versandmaterial?
Sie brauchen fachliche Beratung?

Wir helfen Ihnen gern.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Instituts-Team